

PUIS-JE UTILISER UN IPHONE 12 SI J'AI UN DISPOSITIF CARDIAQUE IMPLANTABLE ?




Medtronic a analysé la technologie de l'iPhone et a conclu qu'elle ne présentait pas de risque accru d'interférences avec les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs implantables simple, double ou triple chambre (CRT- D/P) Medtronic, lorsque ces outils de communication sont utilisés conformément aux recommandations figurant dans nos manuels.

Par précaution, nous conseillons cependant de maintenir une distance de 15 cm entre le téléphone et votre dispositif implanté.




EXEMPLES :


TENEZ VOTRE
TÉLÉPHONE DU
**CÔTÉ OPPOSÉ À CELUI
DE VOTRE DISPOSITIF.**

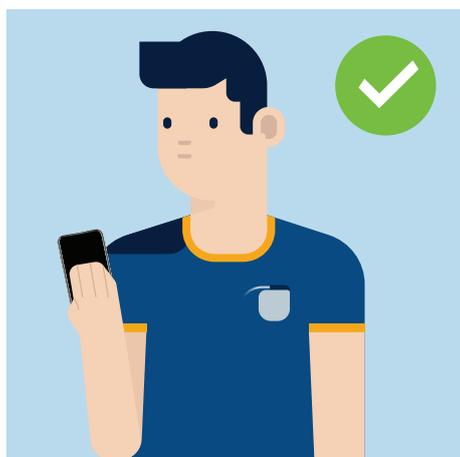

**NE POSEZ PAS VOTRE
TÉLÉPHONE SUR
VOTRE POITRINE**
LORSQUE VOUS ÊTES EN
POSITION ALLONGÉE.

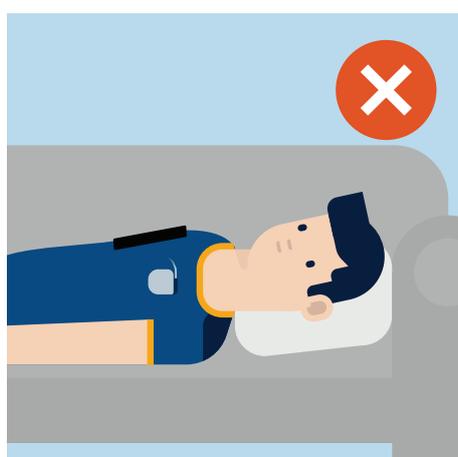

**NE PLACEZ PAS VOTRE
TÉLÉPHONE DANS UNE
POCHE POITRINE DU
CÔTÉ DU DISPOSITIF**
LORSQUE VOUS VOUS
DÉPLACEZ.

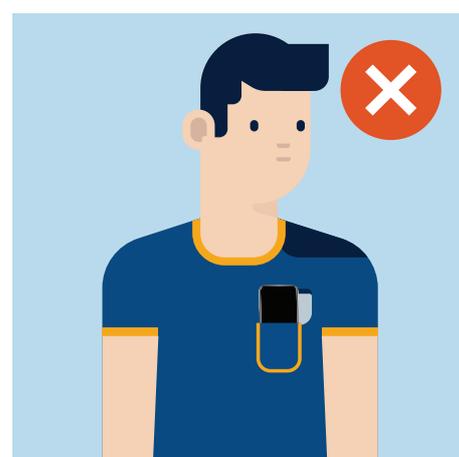

Une étude récemment publiée ¹ a fait état d'interférences créées par un iPhone 12. Ce travail n'a pas respecté, dans sa méthodologie, la recommandation d'une distance de 15 cm ni les instructions figurant dans nos manuels.

De même qu'avec les autres iPhones/smartphones, il n'y a pas de risque accru d'interférence lorsque les instructions sont respectées.

Pour protéger les patients des interférences rencontrées lors de leurs activités quotidiennes, nos dispositifs cardiaques intègrent des protections, notamment des filtres électroniques qui distinguent les signaux liés à l'activité cardiaque d'autres signaux parasites créés par les interférences.

L'iPhone 12 d'Apple comporte un aimant qui permet à ce téléphone de s'aligner plus facilement avec des accessoires externes. Selon Apple (<https://support.apple.com>), la technologie MagSafe des modèles d'iPhone 12 ne présente pas un plus grand risque d'interférences magnétiques avec les appareils médicaux que les modèles d'iPhone précédents.

Référence :

1 E.B. Asher et al., Smart wearable device accessories may interfere with implantable cardiac devices, Heart Rhythm Society, Case Report, 2020 [https://www.heartrhythmcasereports.com/article/S2214-0271\(20\)30274-8/fulltext](https://www.heartrhythmcasereports.com/article/S2214-0271(20)30274-8/fulltext)

Le contenu fourni dans ce document l'est à titre d'information seulement et ne se substitue en aucun cas au traitement, au diagnostic ou à l'avis d'un professionnel de la santé. Aucune des informations qu'il contient ne pourra être interprétée comme la promotion d'un produit non autorisé par la législation ou la réglementation de votre pays de résidence, ni comme une incitation à utiliser un tel produit. La réponse à un traitement peut varier d'un patient à l'autre.

Veillez toujours contacter votre médecin si vous avez des questions ou des doutes concernant votre santé.

Medtronic

Medtronic France S.A.S.
9 boulevard Romain Rolland
75014 Paris
Tél. : 01 55 38 17 00
Fax : 01 55 38 18 00

RCS Paris 722008232

medtronic.fr

UC202114285 FF © Medtronic France 2021.
Tous droits réservés. Crédit photo : Medtronic.
Imprimé en France par Medtronic.
Création Décembre 2021